

# Protocole de soin de plaies 3M

	Profondeur	Exsudat	Nécrose (noir)	Fibrine (jaune)	Granulation (rouge)	Protection des pourtours de la plaie	Aperçu des produits
Plaie avec un taux normal de bactéries	< 0,5cm	 Pas ou peu	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Film / Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Hydrocolloid Thin	Tegaderm Hydrocolloid Thin	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid: pansement hydrocolloïde recouvert d'un film adhésif transparent 3M™ Tegaderm™ imperméable aux liquides, bactéries et virus. Disponible dans les formes ovales, carrées et sacrales.
		 Peu à modérément	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrocolloid	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin: pour le traitement de plaies modérément exsudatives.
		 Modérément à beaucoup	Beaucoup à abondamment	Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Foam: pansement hydroactif en polyuréthane hautement absorbant recouvert d'un film aéré formant une barrière contre les liquides, bactéries et virus.
	> 0,5cm	 Modérément à beaucoup		Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive: pansement hydroactif composé d'une mousse de polyuréthane conforme et d'une couche additionnelle super absorbante en non tissé. Il est recouvert d'un film adhésif transparent 3M™ Tegaderm™ imperméable aux liquides, bactéries et virus.
Plaie avec un taux très élevé de bactéries	< 0,5cm	 Peu à modérément	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Alginate: compresse absorbante en fibres d'alginate.
		 Modérément à beaucoup	Beaucoup à abondamment	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film
	> 0,5cm	 Modérément à beaucoup		Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrogel: Hydrogel qui crée un environnement humide et favorise ainsi la guérison de la plaie. 3M™ Tegaderm™ Cavilon™: film liquide sans alcool, qui sèche rapidement et forme sur la peau un écran transparent, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Il a été développé pour protéger la peau contre l'urine, les matières fécales et autres sécrétions corporelles, les adhésifs et les frottements.

- Attention :
- \*Humidifier éventuellement avec de l'eau stérile
  - En cas de doute ou d'infection, contacter toujours le médecin traitant
  - Traiter toujours les affections sous-jacentes

