

# 3M Wondzorgprotocol

Diepte	Exsudaat	Necrose (zwart)	Fibrinebeslag (geel)	Granulatieweefsel (rood)	Wondrand-bescherming	Overzicht producten		
Wonde met normale bacteriële load	< 0,5cm	Geen of weinig	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Film / Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Hydrocolloid Thin	Tegaderm Hydrocolloid Thin	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid: hydrocolloid verband voorzien van een transparante adhesieve 3M™ Tegaderm™ film, ondoordringbaar voor vloeistoffen, bacteriën en virussen. Verkrijgbaar in ovaal, vierkant en sacraal formaat.	
		Weinig tot matig	Tegaderm Hydrogel + Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrocolloid	Tegaderm Hydrocolloid	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin: voor de behandeling van matig exsuderende wonden.	
	> 0,5cm	Matig tot veel	Veel tot zeer veel	Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Foam: sterk absorberend, hydroactief verband in polyurethaan, voorzien van een luchtdoorlatende film welke een barrière vormt voor vloeistoffen, bacteriën en virussen.	
		Matig tot veel		Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive: hydroactief verband bestaand uit een polyurethaanschuim en een tweede, super absorberende laag in non-woven. Het verband is tevens voorzien van een transparante, adhesieve 3M™ Tegaderm™ film, ondoordringbaar voor vloeistoffen, bacteriën en virussen.	
Wonden met sterk verhoogde bacteriële load	< 0,5cm	Weinig tot matig	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Film	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Alginate: absorberend compres bestaand uit algiinatvezels.	
		Matig tot veel	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Alginate Ag: absorberend compres bestaand uit algiinaat- en zilver voor een antimicrobiële barrière.	
	> 0,5cm	Matig tot veel	Veel tot zeer veel	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Hydrogel: Hydrogel die een vochtig milieu creëert en zo de genezing van de wonde stimuleert.
		Matig tot veel		Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Tegaderm Alginate Ag* + Tegaderm Foam / Foam Adhesive	Cavilon Film	3M™ Tegaderm™ Cavilon™: legt een vloeibare film op de huid zonder alcohol, welke snel droogt en een transparante, lucht- en waterdampdoorlatende barrière vormt. Speciaal ontwikkeld om de huid te beschermen tegen kleefstoffen, wrijvingen, urine, faeces en andere lichaamsafscheidingsen.	



- Opgelet:
- \*Eventueel bevochtigen met steriel water
  - Bij twijfel of infectie, contacteer altijd de behandelende arts
  - Behandel steeds de onderliggende aandoeningen

