

3M™ Cavilon™



# Účinná ochrana pokožky

v každém věku

Nedráždivý bariérový film  
Ochranný bariérový krém



**3M**

# 3M™ Cavilon™

## Nedráždivý bariérový film



Film chrání pokožku před macerací a drážděním v důsledku přítomnosti moči, stolice, exsudátu z rány, adhezivních materiálů a třecích sil.

- Nedráždí tkáň a nepůsobí bolest
- Není cytotoxický
- Neobsahuje alkohol
- Bezbarvý, transparentní
- Propustný pro kyslík a vodní páry
- Na jednu aplikaci účinkuje až 72 hod.
- Hypoalergenní




Chrání porušenou kůži při inkontinenci.



Ošetření okolí I.V. vstupů.



Ošetření ran

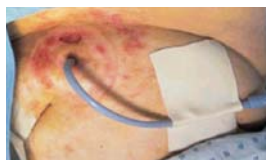

Ošetření okolí drenáží, stomií a ran.



Chrání pokožku před adhezivou.



Léčba již poškozené kůže a prevence macerace

## Indikace a aplikace

Bariérový film 3M Cavilon působí jako ochranná bariéra mezi kůží a dráždivými tělesnými tekutinami. Doporučujeme používat jako preventivní ošetření v okolí tracheostomií a dréňů, na okolí secernujících ran, i. v. katetrů (pouze ve sterilní verzi) a při riziku poškození kůže adhezivními materiály. Jeho účelem je působit jako bariéra proti chemickému a částečně i mechanickému dráždění.

Nanáší se na čistou suchou kůži. Aplikaci je třeba opakovat po 48-78 hodinách (v běžných podmínkách). Nepoužívejte na infikované oblasti (př. mykózy) nebo jako náhradu sterilního krytí.

# 3M™ Cavilon™

## Ochranný bariérový krém




Krém chrání nenarušenou nebo jen podrážděnou (zarudlou) pokožku před působením stolice, moči a jiných tekutin. Pokožku hydratuje a pomáhá ji zachovat jemnou a vláčnou.

- Prodyšný, voděodolný
- Trvanlivý, se zvýšenou odolností proti smytí
- Stačí nepatrné množství pro dostatečnou ochranu
- Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty
- Díky hypoalergennímu složení též vhodný pro ošetření pokožky kojenců a malých dětí



### Jak funguje ochranný krém 3M™ Cavilon™?

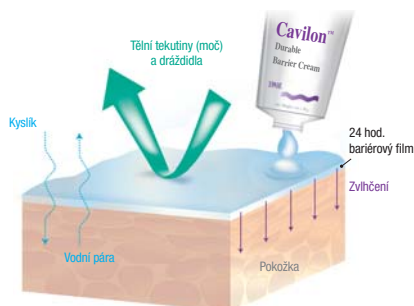

Nesnižuje absorpční funkci plen a podložek (rychle a dokonale se vstřebává do pokožky, nestírá se na lůžkoviny nebo savé plochy)

Neomezuje adhezivní funkci – lepení (nedochází ke znehodnocení dalších materiálů)

---

### Indikace a aplikace

Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty.

Aplikujte denně nebo po každém 3.-4. mytí.



# 3M™ Cavilon™



## Jak poznám, který Cavilon použít pro své pacienty?

- **Použijte Cavilon nedráždivý bariérový film**
  - na ochranu a léčbu podrážděné nebo poškozené pokožky
  - okolo ran jako dlouhodobou ochranu.
- **Použijte Cavilon ochranný bariérový krém**
  - na nepoškozenou pokožku jako prevenci před dráždivými tělními tekutinami. Primární použití pro inkontinentní pacienty (děti i geriatrické pacienty)

## Jak mohu objednat Cavilon?

**Cavilon můžete objednat pod uvedenými katalogovými čísly v následujícím provedení a balení.**

### 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - Nedráždivý bariérový film

kat. číslo	popis	ks/balení	VZP
3343E	tampón 1 ml	25	-
3343P	tampón 1 ml	5	81422
3345E	tampón 3 ml	25	-
3345P	tampón 3 ml	5	80864
3346E	spray 28 ml	12	-
3346P	spray 28 ml	1	80863

### 3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream - Ochranný bariérový krém

kat. číslo	popis	ks/balení	VZP
3391E	tuba 28 g	1	-
3392E	tuba 92 g	1	-
3392S	sáček 2 g	20	-

## Kde mohu Cavilon zakoupit?

**Cavilon zakoupíte v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb prostřednictvím naší distribuční sítě:**

**Schubert CZ, spol. s r.o.**  
Na Bělidle 8, Praha 5  
Tel.: 251 001 197  
info@schubert24.cz

**MEDICAL M, spol. s r.o.**  
Mezní 4, Ústí n. Labem  
Tel.: 475 601 018  
info@medicalm.cz



**3M Česko, spol.s r.o.**  
Vyskočilova 1  
140 00 Praha 1  
Tel.: 261 380 111  
Fax: 261 380 110  
E-mail: 3MCesko@3M.cz  
www.3M.cz/Cavilon