

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

Návod k použití

Ochranný bariérový krém

Bariérový krém 3M™ Cavilon™ je koncentrovaný krém s vyváženou hodnotou pH určený k ochraně kůže před působením tělesných tekutin a k ošetření zarudlé a podrážděné kůže nanesením trvanlivé ochranné bariéry. Krém rovněž zvlhčuje suchou pokožku. Umožňuje bezproblémové přilnutí adhezivních materiálů.



Indikace:

Ochrana „rizikové“ kůže před poškozením v souvislosti s inkontinencí. Krém uchová kůži intaktní a ochrání ji před škodlivými vlivy při chronické inkontinenci. Lze ho také použít ke zvlhčování a ochraně velmi suché pokožky. Krém nesnižuje přilnavost zdravotnických lepicích pásek ani adhezivních krytí.

Varování:

POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ. Nesmí přijít do styku s očima.

Pokud se stav zhorší nebo do sedmi dnů nezlepší, poraďte se s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte k ošetření osob se zjištěnou alergickou přecitlivělostí na některou z uvedených složek.

Upozornění:

Ochranný bariérový krém Cavilon může zvýšit přilnavost některých adhezivních výrobků.

Návod k použití:

Šetrně očistěte pokožku v potřebném rozsahu. Naneste tenkou vrstvu trvanlivého bariérového krému Cavilon tak, aby pokryla celý postižený povrch.

Opakujte postup podle potřeby. Je-li pokožka na omak olejovitá, bylo krému naneseno příliš mnoho.

Složení:

dimetikon, voda, dikapryladipát, kokosový olej, PPG(15), stearyl éter, dipropylen, glykol, isopropylpalmitát, minerální olej, kopolymer kyseliny etylen/akrylové, terpolymerový akrylát, parafin, síran hořečnatý, propylenglykol, vůně, diazolidinylurea, metylparaben, propylparaben.

Uchování:

Nejlépe je uchovávat krém při pokojové teplotě.

Nezmrazovat.

Chránit před nadměrným horkem a vlhkostí.

Další informace vám podá místní pobočka 3M.



3M Česko spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00, Praha 4

Tel: 261 380 111

3MCesko@3M.cz

www.3m.cz/Cavilon