

# 3M™ Tegaderm™ Absorbent

## Medicazione acrilica trasparente assorbente

### Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.  
Sostituire la medicazione quando l'essudato avrà saturato il tampone centrale (lievemente opacizzato), sostituire la medicazione se si distacca o se si nota essudato sotto il bordo adesivo.  
Sollevare con attenzione i bordi della medicazione dalla pelle. In caso di difficoltà applicare un cerotto sul bordo e usare quest'ultimo per sollevare la medicazione (tecnica "stretch").  
Quando i bordi risultano completamente sollevati togliere la medicazione lentamente ripiegandola su se stessa.

### Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



### Informazioni per gli ordini

Codice prodotto	Formato	Dimensione tampone (cm)	Dimensioni totali medicazione	Medicazioni per scatola	Medicazioni per confezione vendita
90800	Ovale	3,8 x 5,7	7,6 x 9,5	5	30
90801	Ovale	6,0 x 7,6	11,1 x 12,7	5	30
90802	Quadrato	10,1 x 10,1	14,9 x 15,2	5	30
90803	Ovale	8,5 x 10,7	14,2 x 15,8	5	30
90805	Quadrato	14,9 x 15,2	20 x 20,3	5	20
90807	Sacrale	11,75 x 14,3	16,8 x 19	5	20

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Absorbent è un dispositivo medico marcato CE.



3M Italia S.p.A.  
Prodotti Medicali  
Località S. Felice  
20090 Segrate MI  
Tel: 02 7035.1  
Fax: 02 7035.2484  
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

# 3M™ Tegaderm™ Absorbent

## Medicazione acrilica trasparente assorbente



### Tutto sotto controllo

- Trasparenza e visibilità
- Assorbenza
- Durata nel tempo

# 3M™ Tegaderm™ Absorbent

## Medicazione acrilica trasparente assorbente



3M Tegaderm Absorbent è una medicazione acrilica trasparente, composta da un tampone assorbente acrilico racchiuso fra due strati di pellicola trasparente adesiva. La pellicola che si trova a contatto con la superficie della ferita è perforata, in modo da permettere l'assorbimento dell'essudato da parte del tampone e dotata di un adesivo "Moist Skin" che consente l'applicazione su cute umida. Il lato esterno della pellicola non è perforato, ciò permette la protezione della ferita da liquidi, batteri e virus ma ne permette la traspirazione.

3M Tegaderm Absorbent, grazie alle sue caratteristiche uniche, permette di mantenere umido l'ambiente della ferita ottimizzando il processo di cicatrizzazione.

### Trasparente

Consente di monitorare costantemente la ferita, l'essudato e la cute perilesionale senza dover rimuovere la medicazione, eliminando così i cambi di medicazione non necessari. La trasparenza consente un facile posizionamento sulla ferita e una continua visione dell'area perilesionale.

### Matrice acrilica ad elevato assorbimento

La medicazione offre un elevato grado di assorbimento considerato il ridotto spessore. Può pertanto rimanere in sede a lungo, facilitando la gestione del paziente.

### Rivestimento in Tegaderm Film

La medicazione rimane ben posizionata anche nei pazienti allettati in quanto il bordo in Tegaderm Film, in aggiunta al ridotto spessore, evita il sollevamento dei bordi dovuto alla frizione.

Il rivestimento Tegaderm Film costituisce inoltre una barriera ai contaminanti esterni, quali fluidi, batteri e virus (inclusi HIV-1 e HBV).


### Sistema di applicazione a cornice

Il sistema di applicazione a cornice rende facile e veloce l'applicazione, consentendo anche una facile manipolazione con i guanti.

### Esempi di utilizzo



Skin tear

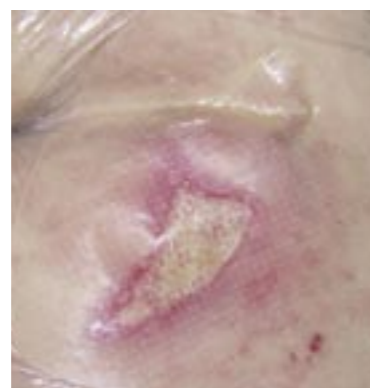

Ulcera II° stadio



Medicazione secondaria (alginato)

### Indicazioni d'uso

3M Tegaderm Absorbent è ideale per ferite con lieve o moderato essudato.

È indicata per:

- Piaghe da decubito
- Skin tears (abrasioni)
- Ustioni superficiali o a spessore parziale
- Lacerazioni cutanee
- Siti di prelievo per trapianto cutaneo
- 3M Tegaderm Absorbent può anche essere utilizzato come cerotto protettivo su pelli a rischio di danneggiamento dovuto ad attrito o tagli.

Ulteriori indicazioni sono:

- medicazione secondaria in combinazione con medicazioni riempitive (alginati)




3M Tegaderm Absorbent  
Medicazione acrilica trasparente assorbente

### Modalità di applicazione

Valutare la ferita e scegliere il corretto formato di medicazione, in modo che almeno 1 cm del tampone assorbente si estenda oltre il margine della ferita.

Rimuovere la carta protettiva scoprendo la parte adesiva. Centrare la medicazione sulla ferita, premere delicatamente il lato adesivo del cerotto facendo scorrere le dita dal centro verso l'esterno. Evitare di tirare la medicazione o la cute. Togliere lentamente la cornice, premendo verso i bordi della pellicola in modo da garantire una buona adesione.

### Struttura di Tegaderm Absorbent

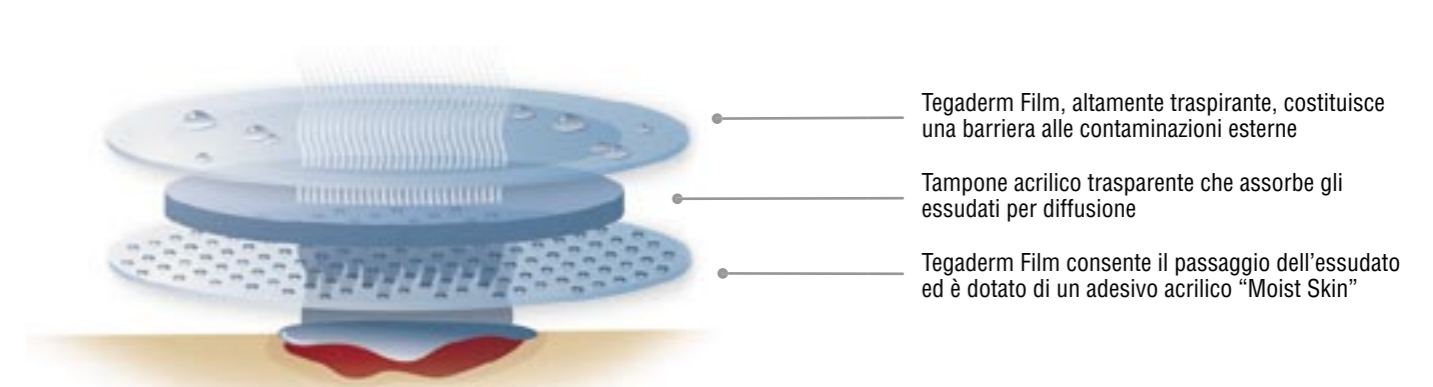

Tegaderm Film, altamente traspirante, costituisce una barriera alle contaminazioni esterne

Tampone acrilico trasparente che assorbe gli essudati per diffusione

Tegaderm Film consente il passaggio dell'essudato ed è dotato di un adesivo acrilico "Moist Skin"