

3M™ Tegaderm™ Alginate Medicazione in Alginato

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codice prodotto	Dimensioni (cm)	Pezzi per scatola	Scatole per cartone
90110	5 x 5	10	10
90112	10 x 10	10	5
90114	10 x 20	5	4
90120	2 x 30 nastro	5	4

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Alginate è un dispositivo medico marcato CE.

3M™ Tegaderm™ Alginate Medicazione in Alginato



Integrità assoluta

- Alta assorbenza
- Facile rimozione

3M

3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

MP 18-07

3M

3M™ Tegaderm™ Alginate Medicazione in Alginato



3M Tegaderm Alginate è una medicazione adsorbente composta da alginato di calcio.

3M Tegaderm Alginate è indicata per la medicazione di ferite con produzione di essudato moderata-alta.

È adattabile ai diversi gradi di profondità delle ferite, sia superficiali che cavitare grazie anche al nuovo formato in nastro.

Per la sua particolare composizione 3M Tegaderm Alginate mantiene la sua integrità senza sfaldarsi e senza disperdere fibre all'interno della ferita. 3M Tegaderm Alginate una volta saturo gelifica permettendo una rimozione facile senza dispersione di componenti, ciò favorisce inoltre un cambio della medicazione più confortevole per il paziente.

3M Tegaderm Alginate è indicato anche per le ferite infette essudanti in quanto in grado di gestire l'essudato e di imprigionare i batteri.

Modalità di applicazione

Scegliere la medicazione della misura appropriata (se necessario è possibile tagliarla).

Applicare la medicazione sulla ferita cercando di non farla fuoriuscire sulla cute perilesionale.

Chiudere la medicazione con Tegaderm Film o con altra medicazione secondaria.

Applicazione di 3M Tegaderm Alginate Nastro: togliere dalla confezione la lunghezza del nastro necessaria.



È necessario aprire il nastro in quanto pressato per la compattezza del confezionamento.



Posizionare il nastro dentro la ferita senza comprimere, cercando di comprendere anche zone sottominante.




Lasciare il capo del nastro verso l'esterno della ferita (facilita la rimozione).

Esempio di utilizzo



Tegaderm Alginate Nastro

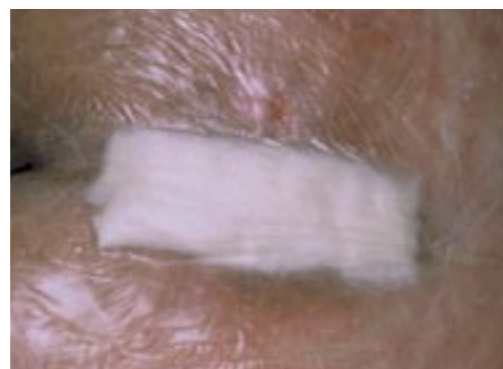

Tegaderm Alginate applicazione sacrale

Indicazioni d'uso

3M Tegaderm Alginate è ideale per ferite con moderato-alto essudato con diversi gradi di profondità, da superficiali a cavitare.

- Piaghe da decubito
- Ulcere degli arti inferiori
- Siti di prelievo e innesti cutanei
- Ferite traumatiche
- Altre lesioni cutanee

Nelle ferite profonde e a tutto spessore 3M Tegaderm Alginate può essere utilizzato per riempire gli spazi morti.

3M Tegaderm Alginate non è consigliato per le ulcere asciutte, ustioni di terzo grado, ferite con escara.



3M Tegaderm Alginate
Medicazione in Alginato

Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.

Sostituire la medicazione se si distacca o se si nota che l'essudato fuoriesce dalla medicazione secondaria, o se necessario ogni 2-4 giorni.

Rimuovere con attenzione la medicazione secondaria, togliere 3M Tegaderm Alginate, manovra facilitata dalla sua integrità. Se 3M Tegaderm Alginate si presenta asciutto o attaccato alla ferita, è consigliato saturare con una soluzione salina per facilitarne la rimozione.