

3M™ Cavilon™ Film Barriera Non Irritante

Rimozione

Non è necessario rimuovere il prodotto in caso di applicazioni successive.
Tuttavia se si desidera, il film può essere rimosso con solventi per adesivi medicali, usati come da indicazione dei produttori.

Consigli d'uso

Per riapplicare Cavilon Film Barriera Non Irritante, pulire e asciugare l'area interessata e riapplicare il prodotto come sopra. Cavilon deve essere usato come barriera primaria contro le irritazioni. L'uso di altri prodotti barriera, come unguenti, creme o lozioni, potrebbe ridurne significativamente l'efficacia. Rimettere il tappo sull'erogatore quando il prodotto non è in uso.

Precauzioni

Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciugato prima di applicare pannoloni o vestiti.
L'applicazione di troppi strati può rendere il prodotto rigido.
Cavilon usato sotto elettrodi può modificare il tracciato.

Informazioni per gli ordini

Codice Ospedaliero	Misure	Pezzi per scatola
3343E	Tampone da 1 ml	100
3346E	Spray da 28 ml	12

Codice Farmacia	Misure	Pezzi di scatola
3343P	Tampone da 1 ml	5
3346P	Spray da 28 ml	1

Informazione riservata al personale sanitario.

Cavilon Film Barriera Non Irritante, applicatori in schiuma e confezione spray sono Dispositivi Medici marcati CE.



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

3M™ Cavilon™ Film Barriera Non Irritante



Effetto barriera

- Protegge fino a 72 ore
- Può essere usato su cute lesa perché non contiene alcool
- Traspirante, impermeabile, trasparente

3M™ Cavilon™ Film Barriera Non Irritante



Cavilon è un protettivo cutaneo in forma liquida che crea sulla pelle una barriera traspirante impermeabile e trasparente, proteggendola dal contatto con i liquidi corporei.

Applicazione su cute lesa

Cavilon non contiene alcool e quindi può essere applicato su cute arrossata o escoriata

Lunga durata

La protezione dura fino a 72 ore in quanto Cavilon resiste ai lavaggi

Trasparenza

Cavilon è un film liquido incolore che consente un continuo monitoraggio della cute

Compatibilità

Cavilon non contiene sostanze che impregnano i pannoloni, lasciandone pertanto inalterata la capacità assorbente. Questo riduce la macerazione.

Non ostacola l'adesione dei prodotti adesivi e non interferisce con l'azione della medicazione applicata.

Caso clinico

Signora di 77 anni, con incontinenza doppia.



Area sacrale con moderato arrossamento, senza escoriazione.



Quattro settimane dopo il primo trattamento. Il leggero arrossamento continua a migliorare dopo l'applicazione di Cavilon Film Barriera Non Irritante.

Esempi di utilizzo

Stomia



Macerazione della cute perilesionale



Lacerazione cutanea



Indicazioni d'uso

Protezione della cute perilesionale in caso di:

- Ulcere vascolari
- Piaghe da decubito
- Piede diabetico
- Stomie

Protezione della cute nella prevenzione e nel trattamento di lesioni da incontinenza.

Protezione della pelle dalle irritazioni dovute ad applicazioni ripetute di cerotti o medicazioni adesive.

Cavilon Film Barriera Non Irritante può essere usato su adulti, bambini e neonati con almeno 1 mese di età.




3M Cavilon
Film Barriera Non Irritante

Modalità di applicazione

3M Cavilon è disponibile in due formati: un pratico tampone in schiuma e uno spray.

- Il tampone in schiuma consente un'applicazione più precisa in aree più piccole, ad esempio stomie ed aree perilesionali e sotto i cerotti per prevenire lacerazioni della cute. Il tampone è sterile e monouso.
- Lo spray permette di coprire zone più ampie, ad esempio la zona sacrale o le gambe. Un flacone da 28 ml consente circa 170 erogazioni.

Tecniche di applicazione

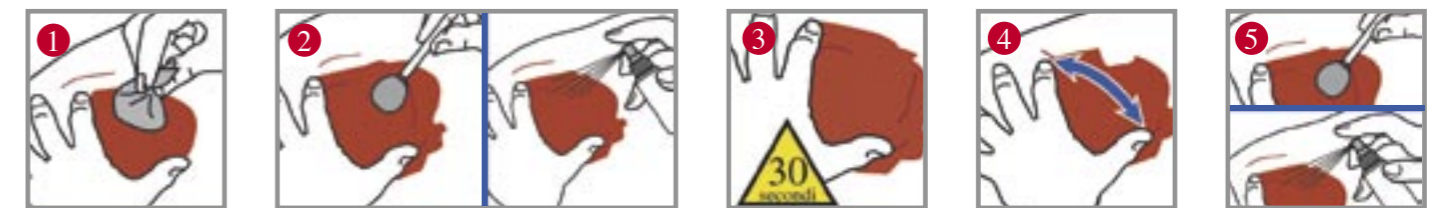

1 La pelle deve essere pulita e asciutta prima dell'applicazione di 3M Cavilon.

2 Applicare una strato uniforme del film sull'intera area da trattare se viene usato l'applicatore in schiuma. Se si usa la confezione spray, tenerlo 10-15 cm dalla pelle e applicare un sottile strato omogeneo sull'intera area da trattare, muovendo lo spray effettuando movimento rotatorio.

3 Se un'area non viene coperta riapplicare in quell'area solo dopo che la prima applicazione è asciugata (circa 30 sec.)

4 Se 3M Cavilon è applicato su un'area con pieghe cutanee o zone di contatto tra pelle e pelle, assicurarsi che queste aree siano separate per consentire alla cute di asciugarsi prima di ritornare nella posizione normale.

5 La riapplicazione è raccomandata almeno ogni 48 - 72 ore (in condizioni normali) o con maggiore frequenza, se necessario.