

3M™ Tegaderm™ Contact

Membrana protettiva non aderente

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codice	Dimensioni (cm)	Pezzi per scatola	Scatole per cartone
5642	7,5 x 10	10	4
5643	7,5 x 20	10	4
5644	20 x 25	5	5

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Contact è un dispositivo medico marcato CE.

3M™ Tegaderm™ Contact

Membrana protettiva non aderente



Dolce contatto

- Protezione per il tessuto neo formato
- Permeabile
- Trasparente



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

MP 17-07



3M™ Tegaderm™ Contact

Membrana protettiva non aderente



3M Tegaderm Contact è una medicazione sterile costituita da tessuto di nylon a bordi saldati, non aderisce alla ferita e non rilascia fibre.

3M Tegaderm Contact è una medicazione ipoallergenica che aiuta a promuovere la chiusura della ferita.

Grazie alla sua peculiarità di medicazione non-aderente trasparente e permeabile, protegge il tessuto granuleggiante, permette il passaggio di essudato verso la medicazione secondaria e consente di controllare visivamente la ferita.

Tutte queste caratteristiche permettono il cambio della medicazione in assenza di traumatismi della ferita, minimizzando così il dolore del paziente.

Modalità di applicazione

Valutare la ferita e scegliere il corretto formato di medicazione, in modo che almeno 1 cm vada oltre il margine della ferita.

Se la ferita è poco essudante inumidire la medicazione con soluzione salina sterile per facilitarne l'applicazione ed assicurare il completo contatto con la superficie della ferita.

Può essere utilizzata una medicazione secondaria per assorbire l'essudato.

3M Tegaderm Contact può essere sostituito ogni 7 giorni, indipendentemente dal numero di cambi della medicazione secondaria assorbente.

Esempi di utilizzo



Protezione lesione aperta



Protezione tessuto granuleggiante


Indicazioni d'uso

3M Tegaderm Contact è consigliato per:

- Piaghe da decubito
- Ulcere degli arti inferiori (anche sotto bendaggi compressivi)
- Ustioni di primo e secondo grado
- Ferite infette (seguire indicazioni da protocollo)
- Lacerazioni cutanee
- Siti di prelievo e di innesti cutanei
- Ferite traumatiche e croniche
- Lesioni dermatologiche



3M Tegaderm Contact
Membrana protettiva non aderente

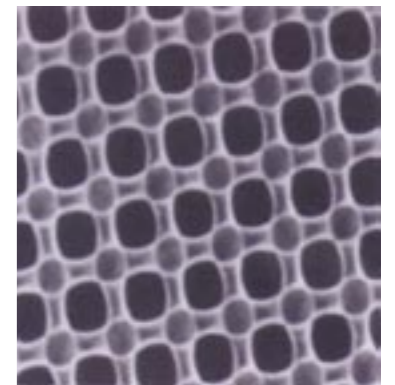

Trama della Membrana Protettiva

Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.

La rimozione di 3M Tegaderm Contact si effettua sollevandone delicatamente i margini.

Quando la medicazione è mantenuta in ambiente umido, essa non aderisce alla ferita e la rimozione risulta indolore.

Se la superficie della ferita si presenta asciutta e la rimozione appare difficoltosa, inumidire con soluzione salina sterile e rimuovere delicatamente.