


3M™ Tegaderm™ Film

Medicazione trasparente


Modalità di rimozione (tecnica "stretch")



1 Applicare un cerotto ad un angolo della medicazione.

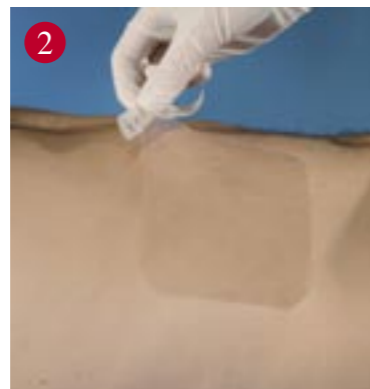

2 Sollevare il bordo della medicazione.

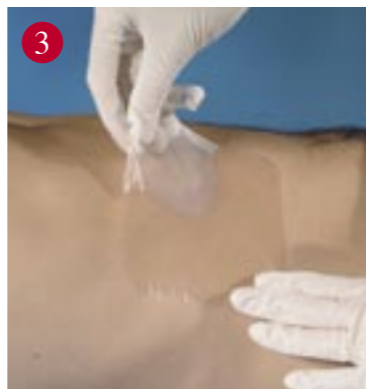

3 Tirare la medicazione verso l'esterno, trattenendo la cute, fino al completo distacco.

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

| Codice | Dimensioni (cm) | Medicazioni/scatola | Scatole/cartone |
|--------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1626 W | 10 x 12 | 50 | 4 |
| 1627 | 10 x 25 | 20 | 4 |
| 1628 | 15 x 20 | 10 | 8 |
| 1629 | 20 x 30 | 10 | 8 |

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Medicazione Trasparente è un dispositivo medico marcato CE.

3M

3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

MP 15-07

3M™ Tegaderm™ Film

Medicazione trasparente



Facile protezione

- Sistema di applicazione a cornice
- Visibilità del sito
- Impermeabilità

3M

3M™ Tegaderm™ Film

Medicazione trasparente



Tegaderm è una medicazione trasparente in film in poliuretano ad alta permeabilità, con un adesivo ipoallergenico e privo di lattice. La medicazione consente uno scambio ottimale di ossigeno e vapore acqueo, tale da mantenere il corretto grado di umidità a contatto con la ferita. Inoltre Tegaderm è impermeabile ai liquidi, batteri e virus e quindi protegge il sito di inserzione dalle contaminazioni esterne.

Facilità d'uso

Il sistema d'applicazione a cornice permette una rapida applicazione, priva di sprechi, anche nelle misure più grandi. Tegaderm è anche facile da rimuovere, utilizzando la tecnica "stretch", senza causare traumi cutanei anche nei pazienti con pelle molto fragile.

Conformabilità

Il film molto elastico e conformabile si adatta ai contorni del corpo e permette il movimento senza causare traumi alla cute. Gli angoli arrotondati evitano l'arricciamento dei bordi.

Trasparenza

Permette il continuo monitoraggio della ferita e della pelle circostante

Protezione

Il film Tegaderm, grazie al suo rivestimento "anti-frizione", consente di minimizzare lo sfregamento e quindi anche il sollevamento dei bordi. Questo garantisce fissaggio e durata in sede ottimale (fino a 7 giorni).

Esempi di utilizzo



Lesione di I° stadio.



Ferita chirurgica asciutta.

Indicazioni d'uso

Medicazione primaria in caso di:

- Piaghe da decubito di I° o II° stadio
- Siti di prelievo per trapianti cutanei
- Ferite chirurgiche pulite e chiuse
- Ferite superficiali, quali abrasioni, lacerazioni, vesciche
- Ustioni di I° e II° grado
- Pelle irritata o continuamente esposta all'umidità
- Medicazione secondaria per il fissaggio di garze o altre medicazioni avanzate.



3M Tegaderm
Medicazione trasparente

Esempi di utilizzo



Lesione di II° stadio.



Medicazione secondaria.



Abrasione.



Arrossamento.