

3M™ Tegaderm™ Foam Medicazione in schiuma non adesiva

Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.

Via via che l'essudato viene assorbito e passa verso la superficie della medicazione saturando la griglia blu; quando l'essudato arriva ai bordi della medicazione o comincia a fuoriuscire, è consigliato il cambio.

Rimuovere delicatamente il bordo del cerotto o la benda.

Sollevare la medicazione dalla ferita.

La frequenza del cambio della medicazione dipende dal tipo di ferita, dalla quantità di essudato e dalla situazione clinica. Cambiare medicazione almeno ogni sette giorni o come indicato dal protocollo di trattamento

Precauzioni

- Non usare la medicazione in associazione con agenti ossidanti come acqua ossigenata e ipocloriti, che possono modificare la struttura e l'attività della schiuma di poliuretano.

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codici	Misure (cm)	Medicazioni/scatola	Scatole/cartone
90600	5 x 5	10	4
90601	10 x 10	10	4
90602	10 x 20	5	6
90603	20 x 20	5	6
90604	8,8 x 8,8	10	4
90605 rotolo	10 x 60	1 rotolo	6 rotoli

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Foam è un dispositivo medico marcato CE.



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm, Coban and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

3M™ Tegaderm™ Foam Medicazione in schiuma non adesiva



Total Fluid Management

- Assorbimento e traspirabilità consentono una gestione totale dell'essudato
- Non si rigonfia ed è altamente conformabile
- Crea un ambiente umido ottimale per la guarigione

3M™ Tegaderm™ Foam

Medicazione in schiuma non adesiva



La medicazione in schiuma 3M Tegaderm Foam è ad alta assorbenza, traspirante, non aderente alla ferita. Essa è costituita da una schiuma di poliuretano a celle aperte adsorbente rivestita da Tegaderm Film. Il film impedisce la fuoriuscita dell'essudato e agisce come barriera ai liquidi ed alle contaminazioni esterne.

Total Fluid Management

Lunga durata

Schiuma ad elevata assorbenza e Tegaderm Film risultano eccellenti nella gestione dei liquidi.

La loro combinazione fornisce una lunga durata e un basso costo di gestione.

Velocità di assorbimento

L'essudato viene velocemente assorbito all'interno del tampone e drenato verso l'alto, il rivestimento di Tegaderm Film grazie alla sua alta traspirabilità evita che l'essudato si accumuli e si sposti verso il tessuto circostante determinando macerazione.

Essendo il cuscinetto di schiuma ad alta assorbenza, esso non si satura e non si rigonfia, riducendo così la possibilità di danneggiare il tessuto cicatrizzato.

Varietà di misure e forme

Sono disponibili un rotolo per le ferite più grandi e una medicazione speciale fenestrata per tracheostomie e altri tubi percutanei o drenaggi.

Facilità d'uso

Griglia blu e loghi 3M indicano la parte superiore della medicazione, ne assicurano quindi la corretta applicazione (griglia blu=esterno, vedi foto 1).

Esempi di utilizzo



Indicazioni d'uso

La medicazione 3M Tegaderm Foam (non adesiva), è ideale per ulcere cutanee a profondità parziale o totale con moderata o elevata produzione di essudato.

È indicata per:

- Piaghe da decubito
- Ulcere venose e arteriose
- Ulcere diabetiche
- Lacerazioni della pelle
- Abrasioni
- Siti di prelievo per trapianti cutanei

Ulteriori indicazioni sono:

- Medicazione secondaria in combinazione con medicazioni riempitive (garze o alginati)
- Sotto bendaggi elastocompressivi nel trattamento delle ulcere venose

Controindicazioni ed avvertenze

Nessuna.

Modalità di applicazione

Rimuovere la medicazione dalla confezione e centrarla sulla ferita, ponendo la griglia blu esternamente. (foto 1)


Posizionare la medicazione sopra la ferita lasciando un bordo sulla pelle intatta.

Si può tagliare la medicazione per adattarla meglio alle dimensioni o alla forma della ferita.

Fissare la medicazione nei seguenti modi:

- Applicazione con cerotto o film trasparente: fare una cornice con un cerotto o con un fim trasparente intorno alla medicazione (l'applicazione a cornice consente di mantenere la corretta traspirazione).
- Applicazione con bende e bende compressive: per limitare l'uso di adesivi si possono utilizzare per il fissaggio bende di garza, maglia tubolare o benda elastica.
- La medicazione può essere utilizzata sotto bende compressive per il trattamento delle ulcere da insufficienza venosa (3M Coban)

FOTO 1

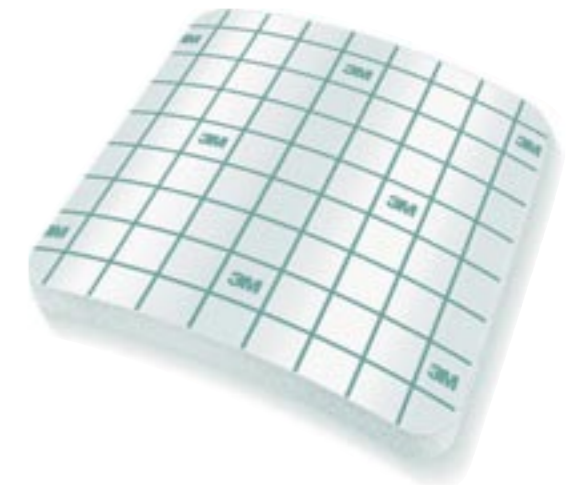

3M Tegaderm Foam
Medicazione in schiuma
non adesiva