

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Medicazione in schiuma adesiva

Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.

Quando l'essudato arriva ai bordi della medicazione, è consigliato il cambio. La frequenza del cambio della medicazione dipende dal tipo di ferita, dalla quantità di essudato e dalla situazione clinica. Cambiare medicazione almeno ogni sette giorni o come indicato dal protocollo di trattamento



1 Sollevare con attenzione i bordi della medicazione dalla pelle. In caso di difficoltà applicare un cerotto sul bordo e usare questo per sollevare la medicazione.



2 Continuare a fare trazione fino a quando il bordo adesivo non sarà completamente libero e rimuovere la medicazione.

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codice	Formato	Dimensioni Tampone (cm)	Dimensioni Totali Medicazione (cm)	Medicazioni/ scatola	Scatole/ cartone
90610	quadrato	5 x 5	8,8 x 8,8	10	4
90611	ovale	6 x 7,6	10 x 11	10	4
90612	quadrato	10 x 10	14,3 x 14,3	10	4
90613	ovale	10 x 11	14,3 x 15,6	5	6
90616	ovale	14 x 17,1	19 x 22	5	3
90619	tondo	7,62 x 7,62	13,97 x 13,97	5	4

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Foam Adhesive è un dispositivo medico marcato CE.



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Medicazione in schiuma adesiva



Total Fluid Management

- Sistema di applicazione unico a raggiera con diverse misure e formati
- Assorbimento e traspirabilità consentono una gestione totale dell'essudato
- Adesività garantita anche su cute umida

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Medicazione in schiuma adesiva



3M Tegaderm Foam Adhesive è una medicazione ad alto assorbimento, pluristratificata costituita da: un tampone di schiuma di poliuretano a celle aperte adsorbente non aderente alla ferita, un ulteriore strato super assorbente ed uno strato esterno costituito da Tegaderm Film. Il film permeabile al vapore, previene le perdite laterali di essudato e protegge da contaminazioni esterne. Tegaderm Film si estende oltre i bordi della schiuma costituendo quindi anche il sistema di fissaggio e permettendo di visionare la cute perilesionale.

Total Fluid Management

Lunga durata

Schiuma ad elevata assorbenza e Tegaderm Film risultano eccellenti nella gestione dei liquidi. La loro combinazione fornisce una lunga durata e un basso costo di gestione.

Velocità di assorbimento

L'essudato viene velocemente assorbito all'interno del tampone e drenato verso l'alto, il rivestimento di Tegaderm Film grazie alla sua alta traspirabilità evita che l'essudato si accumuli e si sposti verso il tessuto circostante determinando macerazione. Essendo il cuscinetto di schiuma ad alta assorbenza, esso non si satura e non si rigonfia, riducendo così la possibilità di danneggiare il tessuto cicatrizzato.

Ideale per cute asciutta e umida

L'adesivo esclusivo "Moist Skin" è stato studiato per garantire un'adesione ottimale sia su cute asciutta che su cute umida, assicurando alla medicazione 3M Tegaderm Foam Adhesive lunghi periodi di permanenza in sede.

Studiato per adattarsi ai margini della ferita

Le caratteristiche del formato rendono superfluo il taglio della medicazione grazie alla completa adattabilità alla ferita. La medicazione 3M Tegaderm Foam Adhesive, infatti, è stata studiata per medicare efficacemente anche le zone più difficili (tallone, gomito, area sacro-coccigea) evitando il sollevamento dei bordi. La struttura a doppio tampone favorisce un'azione antidecubito.

Sistema di applicazione unico

Il dispositivo a raggiera brevettato permette la facile applicazione della medicazione ed evita che questa si ripieghi su se stessa. 3M Tegaderm Foam Adhesive si applica velocemente con una sola mano. Le alette laterali consentono una facile applicazione anche con i guanti.

Modalità di applicazione

Valutare la ferita e scegliere la medicazione delle dimensioni più appropriate, lasciando un bordo sulla pelle intatta. Tallone-gomito-ginocchio: immobilizzare l'arto con una mano e con l'altra posizionare la medicazione sulla ferita.

Fasi dell'applicazione tallone/gomito/ginocchio



1 Prendere la medicazione da una delle alette laterali e rimuovere la carta protettiva scoprendo così il bordo adesivo.



2 Premere delicatamente lo strato adesivo sulla pelle. Evitare di tendere eccessivamente la medicazione e/o la pelle.



3 Partendo dal centro della medicazione, afferrare una delle sezioni dello strato a raggiera e tirarlo verso il bordo esterno. Ripetere la stessa operazione per le altre parti dello strato a raggiera.



4 Distendere premendo bene la medicazione dal centro verso i bordi.

Indicazioni d'uso

La medicazione 3M Tegaderm Foam Adhesive è ideale per ulcere cutanee a profondità parziale o totale con moderata o elevata produzione di essudato. È indicata per:

- Piaghe da decubito
- Ulcere venose
- Ulcere arteriose
- Ulcere diabetiche
- Lacerazioni della pelle
- Abrasioni
- Siti di prelievo per trapianti cutanei
- Ustioni di I° e II° grado

Ulteriori indicazioni sono:

- Medicazione secondaria in combinazione con medicazioni riempitive (garze o alginati)
- Sotto bendaggi elastocompressivi nel trattamento delle ulcere venose

Controindicazioni ed avvertenze

Nessuna.

Precauzioni:

- Non usare la medicazione in associazione con agenti ossidanti come acqua ossigenata e ipocloriti, che possono modificare la struttura e l'attività della schiuma di poliuretano.



3M Tegaderm Foam Adhesive
Medicazione in schiuma adesiva