

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin Medicazione idrocolloidale

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codice	Formato	Dimensione tampone (cm)	Dimensioni totali medicazione (cm)	Medicazioni per scatola	Scatole per cartone
Tegaderm Hydrocolloid		Con bordo			
90001	ovale	7 x 9	10 x 12	5	20
90003	ovale	10 x 12	13 x 15	5	12
90004	ovale	14 x 17	17 x 20	3	20
90007	sacrale	12,3 x 13,9	16 x 17	6	4
Tegaderm Hydrocolloid		Senza bordo			
90002	quadrato		10 x 10	5	20
90005	quadrato		15 x 15	3	20
Tegaderm Hydrocolloid Thin		Con bordo			
90021	ovale	7 x 9	10 x 12	10	10
90023	ovale	10 x 12	13 x 15	10	6
90024	ovale	14 x 17	17 x 20	6	10
Tegaderm Hydrocolloid Thin		Senza bordo			
90022	quadrato		10 x 10	5	20

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin sono dispositivi medici marcati CE



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin Medicazione idrocolloidale



Sottile integrità



- Elevato assorbimento
- Durata nel tempo
- Forma ovale e sacrale per una più facile applicazione

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin Medicazione idrocolloidale



3M Tegaderm Hydrocolloid e 3M Tegaderm Hydrocolloid Thin sono medicazioni sterili, adesive, assorbenti, composte da una matrice idrocolloidale, con un elevato grado di assorbimento. La struttura della matrice idrocolloidale e la presenza del Tegaderm Film rendono la medicazione 3M Tegaderm Hydrocolloid una medicazione semi-occlusiva che permette di mantenere umido l'ambiente della ferita ottimizzando il processo di cicatrizzazione.

Lunga durata

3M Tegaderm Film ricopre la superficie esterna e costituisce quindi una barriera alle contaminazioni esterne. Nelle versioni sagomate il Tegaderm Film si estende oltre i bordi e costituisce anche il sistema di fissaggio. Questo, associato ad un elevato grado di assorbimento e ad uno spessore molto ridotto di 3M Tegaderm Hydrocolloid, consente una maggiore durata in sede (fino a 7 giorni).

Integrità

La struttura della matrice idrocolloidale di 3M Tegaderm Hydrocolloid non si disgrega a contatto con gli essudati, consentendo di rimuovere la medicazione senza che alcun residuo rimanga all'interno della ferita.

Praticità d'uso

Il sistema di applicazione, a cornice nel formato sacrale rende semplice e veloce l'applicazione, consentendo anche una facile manipolazione con i guanti.

Modalità di applicazione

Valutare la ferita e scegliere il corretto formato di medicazione, in modo che almeno 2,5 cm del tampone assorbente si estenda oltre il margine della ferita. Rimuovere la carta protettiva scoprendo la parte adesiva. Applicare la parte adesiva sulla ferita.

Applicazione sacrale



1 Centrare la medicazione sulla ferita, premere delicatamente il lato adesivo del cerotto facendo scorrere le dita dal centro verso l'esterno.



2 Evitare di tirare la medicazione o la cute. Togliere lentamente la cornice, premendo verso i bordi della pellicola in modo da garantire una buona adesione.



Indicazioni d'uso

3M Tegaderm Hydrocolloid è indicato come medicazione per ferite con moderata o elevata produzione di essudato.

3M Tegaderm Hydrocolloid Thin è indicato come medicazione per ferite con scarsa o moderata produzione di essudato.

Entrambe sono indicate come:

- Medicazione primaria in ulcere da pressione
- Abrasioni
- Ulcere agli arti inferiori
- Ustioni di I° e II° grado
- Siti di prelievo cutaneo.
- Medicazioni protettive per la prevenzione dei danni tissutali dovuti alla frizione.



3M Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin
Medicazioni idrocolloidali

Rimozione

Controllare frequentemente la medicazione.

Sostituire la medicazione quando l'essudato avrà saturato l'idrocolloide, se si distacca o se si nota essudato sotto il bordo adesivo.

3M Tegaderm Hydrocolloid può rimanere in sito fino a sette giorni.

Sollevare con attenzione i bordi della medicazione dalla pelle. In caso di difficoltà applicare un cerotto sul bordo e usare questo per sollevare la medicazione (tecnica "stretch"). Quando i bordi risultano completamente sollevati togliere la medicazione lentamente ripiegandola su se stessa.