

3M™ Tegaderm™ Hydrogel Riempitivo in gel per ferite



Facile applicazione

- Elevata densità
- Latex free

3M™ Tegaderm™ Hydrogel

Riempitivo in gel per ferite



3M Tegaderm Hydrogel è un gel amorfo composto da un'elevata percentuale di acqua, privo di conservanti, formulato per aiutare la formazione di un ambiente umido nel letto della ferita che favorisca la guarigione. 3M Tegaderm Hydrogel è indicato per ferite che necessitano del debridment autolitico e ferite con escara. L'elevata densità consente una più facile applicazione in quanto il gel aderisce in modo uniforme al letto della ferita.

Indicazioni d'uso

- Ferite con escara che necessitino del debridment autolitico
- Ulcere dermiche secche o minimamente essudanti
- Abrasioni
- Lacerazioni
- Ulcere venose
- Ulcere arteriose
- Ulcere diabetiche
- Ustioni superficiali o a spessore parziale
- Lacerazioni cutanee
- Fistole
- Lesioni sottominate

3M Tegaderm Hydrogel può essere utilizzato anche in ferite infette purchè sotto lo stretto controllo del personale sanitario.

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.

Informazioni per gli ordini

Codice	Dimensione	Tubi/scatola	Scatole/cartone
91110	15 grammi	10	10

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Hydrogel è un dispositivo medico marcato CE.

3M

3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali
Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

Controindicazioni ed avvertenze

Nessuna.

Esempio di utilizzo



Modalità di applicazione

Premere il tubo per permettere la fuoriuscita del gel e farlo entrare nella superficie cutanea interessata; evitare di applicare il prodotto ai bordi della zona da trattare. Ricoprire la zona cutanea di applicazione con una medicazione secondaria in modo da poter permettere al gel di svolgere la sua azione mantenendo un ambiente umido. Evitare un eccessivo ed improprio uso del prodotto. La frequenza del cambio della medicazione dipende dal tipo di ferita, dalla quantità di essudato e dalla situazione clinica.



3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006