

3M™ Tegaderm™ Roll Film trasparente in rotolo

Modalità di applicazione sacrale



1 Si consiglia l'utilizzo del rotolo di altezza 15 cm. Tagliare una sezione del rotolo di almeno 20 cm o di più a seconda della zona da trattare. Piegare in due la medicazione così tagliata, con la pellicola bianca all'esterno. Tagliare gli angoli ad un'estremità, creando un taglio a "v" nel centro della medicazione.



2 Aprire la medicazione, togliere la pellicola bianca ed applicarla in modo che il taglio a "v" sia al centro della plica dei glutei. Premere sulla medicazione per farla aderire bene, soprattutto nella zona perianale. Questo consente di assicurare una buona durata in sede.



3 Rimuovere la pellicola trasparente superiore come mostrato nella figura, premendo sulla medicazione. Se è necessario applicare un secondo pezzo di 3M Tegaderm Roll, sovrappo-
nendo di circa di 1-2 cm sulla parte superiore della medicazione.

Medicazione a cornice



Si consiglia l'utilizzo del rotolo altezza da 5 o 10 cm (dipende dalla misura e dallo spessore della medicazione primaria). Tagliare 4 strisce di 3M Tegaderm Roll e applicarle ai quattro lati della medicazione primaria, sovrappo-
nendo agli angoli circa 1-2 cm.

Tecnica di rimozione



Prendere il bordo della medicazione e tirare esternamente, trattenendo la cute dal lato opposto. L'elasticità del materiale consente alla medicazione di sollevarsi dalla cute fino alla completa rimozione e senza causare traumi (tecnica "stretch").

Consigli per la cura della cute perilesionale

Per proteggere la cute perilesionale da eventuale macerazione o irritazioni, è sempre consigliabile applicare 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante, ideale anche per cute lesa.



Informazioni per gli ordini

Codice	Dimensioni	Rotoli per scatola
16002	5 cm x 10 m	4
16004	10 cm x 10 m	4
16006	15 cm x 10 m	4

Informazione riservata al personale sanitario.

3M Tegaderm Roll è un dispositivo medico marcato CE.



3M Italia S.p.A.
Prodotti Medicali

Località S. Felice
20090 Segrate MI
Tel: 02 7035.1
Fax: 02 7035.2484
3mmedicazioni@mmm.com

3M, Tegaderm and Cavilon are registered trademarks of 3M company

© 3M Health Care 2006

3M™ Tegaderm™ Roll Film trasparente in rotolo



Fissaggio rapido

- Tutti i benefici di Tegaderm Film in un rotolo non sterile
- Un film adesivo, impermeabile e traspirante con la massima flessibilità e versatilità

3M™ Tegaderm™ Roll

Film trasparente in rotolo



3M Tegaderm Roll è una medicazione trasparente in poliuretano ad alta permeabilità, in rotolo non sterile, con un adesivo ipoallergenico e privo di lattice.

Facilità d'uso

Il sistema di applicazione con due alette laterali consente di tenere e posizionare la medicazione anche con i guanti, mantenendo una perfetta visibilità del sito da medicare. Tegaderm Roll è anche facile da rimuovere, utilizzando la tecnica "stretch", senza causare traumi cutanei anche nei pazienti con pelle molto fragile.

Conformabilità

Il film molto elastico e conformabile si adatta ai contorni del corpo e permette il movimento senza causare traumi alla cute.

Protezione

Il film Tegaderm, grazie al suo rivestimento "anti-frizione", consente di minimizzare lo sfregamento e quindi anche il sollevamento dei bordi. Questo garantisce fissaggio e durata in sede ottimale (fino a 7 giorni).

Modalità di applicazione

Fasi dell'applicazione



1 Selezionare l'altezza appropriata di Tegaderm Roll. Tagliare la lunghezza necessaria.



2 Eventualmente arrotondare gli angoli della medicazione. Staccare la pellicola bianca contrassegnata dal numero 1.



3 Centrare 3M Tegaderm Roll sulla zona da proteggere o sulla medicazione primaria. Applicare la medicazione senza tirarla. Togliere la pellicola superiore contrassegnata dal numero 2.



4 Premere delicatamente 3M Tegaderm Roll dal centro verso i bordi. Questo favorisce la corretta adesione della medicazione in quanto l'adesivo è sensibile alla pressione.

Precauzioni

Trattandosi di un prodotto non sterile, non usare su cute lesa, ferite aperte o per la protezione di cateteri intravascolari.

Indicazioni d'uso

- Protezione della pelle a rischio dalla frizione e dall'azione di liquidi corporei
- Protezione di medicazioni durante la doccia
- Fissaggio secondario impermeabile di altre medicazioni avanzate
- Situazioni in cui sia necessario un "cerotto" impermeabile e traspirante.



3M Tegaderm Roll
Film trasparente in rotolo

Modalità di applicazione su tallone/gomito/ginocchio

(assicurarsi che il gomito o il ginocchio sia leggermente piegato)




1 Si consiglia di utilizzare l'altezza da 5 cm. Tagliare due strisce di 3M Tegaderm Roll della lunghezza desiderata per coprire completamente l'area.




2 Posizionare una striscia di Tegaderm verticalmente così da centrarla sull'area da medicare.




3 Premere per far aderire bene la medicazione.

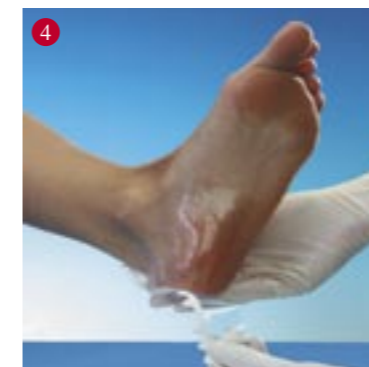

4 Rimuovere il liner come indicato.

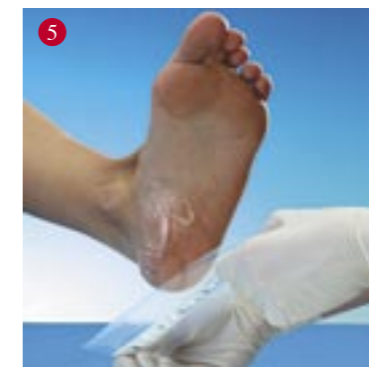

5 Applicare una seconda striscia in posizione verticale, in modo che si sovrapponga con la prima per almeno 1 cm. Applicare come indicato nelle figg. 2 e 4.

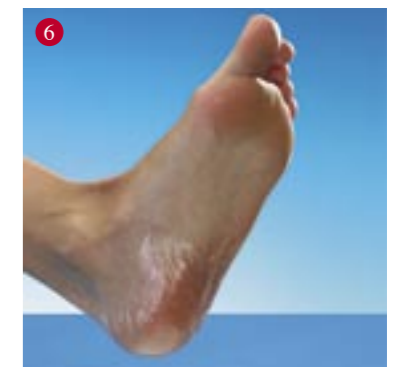

6 Premere su tutta la medicazione per farla aderire bene.