

## Ketac™ Cem Plus

Ciment pentru cimentări definitive, sistem pastă/pastă în dispenser Clicker™



Dozare simplă din dispenser Clicker™ 1:1, amestecare ușoară

## Ketac™ Cem Plus



### Indicații:

- Cimentarea coroanelor metalice, inlay-urilor, onlay-urilor (inclusiv coroane din oțel inoxidabil)
- Cimentarea coroanelor și punților metalo-ceramice
- Cimentarea restaurărilor ceramice cu miez din aluminiu sau zirconiu
- Cimentarea pivoților endodontici
- Cimentarea sistemelor ortodontice


### Ketac Cem Plus ușurează cimentarea

Cimentul pentru cimentări definitive Ketac Cem Plus combină perfect ușurința în manevrare cu performanțele clinice deosebite. Ciment ionomer de sticlă modificat cu rășini, Ketac Cem Plus eliberează fluor, este ușor de amestecat și aplicat, iar excesul se îndepărtează cu ușurință. Excelentă rezistență a cimentării și absența sensibilității post-operatorii.

Caracteristici	Avantaje	Beneficii
Noua generație de cimenturi ionomer de sticlă modificate cu rășini	Adeziune foarte bună	Adeziune excelentă la diferite materiale pentru restaurări. Adeziune bună la smalț și dentină.
	Grosime subțire a filmului	Permite aplicarea corectă a restaurărilor indirecte
	Risc minim de apariție a sensibilității post-operatorii	Oferă pacienților confort și încredere
	Solubilitate foarte mică; excelentă închidere marginală	Cimentări de lungă durată
	Excesul se îndepărtează cu ușurință	Economie de timp pentru medic și pacient
	Insipid, inodor	Confortabil
	Recomandat pentru orice tip de cimentări	Alegere ușoară
	Radiopac	Vizibil pe radiografiile cu raze X

### Adeziune puternică

Ketac Cem Plus conferă adeziune excelentă unei game largi de materiale pentru restaurări și de asemenea prezintă valori mari de adeziune la smalț și dentină.

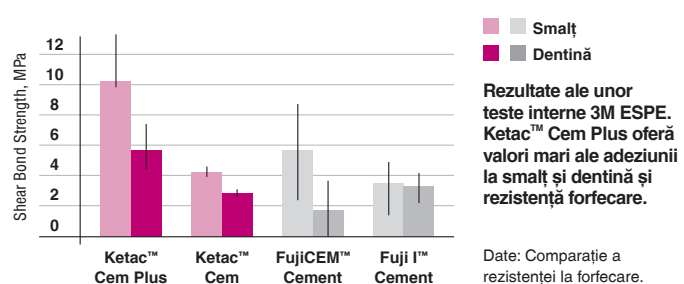

Vol.21, No.6, July/August 2004  
Evaluat și publicat folosind numele american al produsului RelyX™ Luting Plus.

## Un plus de performanță

Formula cimentului ionomer de sticlă modificat cu rășini Ketac™ Cem Plus oferă beneficii clinice îmbunătățite față de cele ale cimenturilor convenționale pulbere-lichid.

### Avantajele sistemului pastă/pastă în dispenser Clicker™ :

	Avantaje	Beneficii
<b>Dispenser Clicker™</b>	Ușor de folosit. Igienic	Sistem pregătit de utilizare în orice moment
	Raport de amestecare controlat și constant	Proprietățile materialului pot fi reproduse cu exactitate și ușurință
	80 dozări; cantitatea dozată este la latitudinea medicului	Min.40 de cimentări (lucrări unidentare) Economic datorită adaptabilității la dimensiunea restaurării
	Indicator de consum	Control mai bun al consumului de material
<b>Formulă pastă/pastă</b>	Ușor de amestecat	Economie de timp pentru medic și pacient
	Dozare precisă	Simplu, economic

### Cinci pași simpli: dozare, amestecare, aplicare, fixare, îndepărtarea exce-




1. estaurare fracturată din amalgam



2. dinte preparat pentru aplicarea coroanei



3. dozare și amestecare ușoară

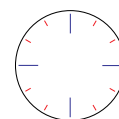

Timp de amestecare 20 sec



4. aplicarea cimentului în coroană



5. fixarea coroanei și îndepărtarea excesului de material



6. rezultat final

Timp de lucru 2 min 50 sec

Timp de priză de la începutul amestecării 5 min 00 sec

Caz clinic, Dr. Radz

## Împachetare



### Item No.

### Product Information

56930

**Ketac Cem Plus – rezerve**

2x 11g dispenser Clicker™

1x pad amestecare

**3M ESPE**

3M Romania SRL  
WTC, Pța. Montreal Nr.10  
D 2.11, 011469 București, Romania  
Tel. +4 021 202 80 00  
+4 021 202 80 53  
Fax +4 021 317 31 84

3M, ESPE, Clicker, Ketac și RelyX sunt mărci înregistrate ale firmei 3M sau 3M ESPE AG.

Tipărit în România

©3M 2006.  
Toate drepturile rezervate.